

## MANUALE D'ISTRUZIONI DBF-335, SKIN SCRUBBER (PEELING ULTRASONICO)



**DESCRIZIONE:** Strumento di esfoliazione facciale dotato di una spatola e un bracciale di sicurezza.

**TRATTAMENTO:** Grazie al peeling a ultrasuoni si ottiene l'esfoliazione, la pulizia profonda e la stimolazione della rigenerazione cellulare della pelle. Il risultato del peeling a ultrasuoni è la riduzione delle rughe e la pelle appare ringiovanita, ben idratata e luminosa. Mediante gli ultrasuoni la spatola trasmette alla pelle onde a frequenza molto bassa e vibrazioni, che rompono in particelle minuscole la sporcizia aderita all'epidermide, e ammorbidiscono la pelle senza bisogno di utilizzare il vapore. Così facendo è possibile rimuovere facilmente le cellule morte, i comedoni, i detriti e la sporcizia della pelle senza aggredirla e minimizzando il dolore



## **AVVERTENZE**

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni dell'apparecchiatura. Se fosse necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o con un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, onde prevenire danneggiare gli elementi elettrici dell'apparecchiatura.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.
- Se il cavo elettrico fosse rotto, chiederne uno in sostituzione al suo distributore per evitare qualsiasi rischio.
- Non provare a separare il generatore di acciaio inossidabile della sua fodera di gomma (manico); qualsiasi tentativo potrebbe causare danni irreparabili nel generatore.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE** Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive: 1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2006/95/EC 2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2004/108/EC

**RICICLAGGIO** Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.


Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre, è consigliabile ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio. L'azienda declina ogni responsabilità su eventuali incidenti dovuti a una manipolazione non corretta del prodotto. L'azienda si riserva il diritto di correggere le informazioni sulle apparecchiature, senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerle.

## CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

- Questi elementi sono soggetti a modifiche senza previo avviso.
- L'aspetto del prodotto può differire dall'immagine.

N°	PRODOTTO	REF	QUANT.
1	SPATOLA ESFOLIAZIONE	10018	1
2	BRACCIALETTO	10019	1
3	UNITÀ PRINCIPALE	-	1
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA	-	1

1

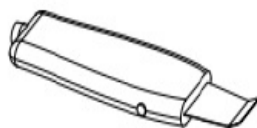

2



3



## PANNELLO FRONTALE



### ISTRUZIONI D'USO

1. Connettere il cavo d'alimentazione nella parte posteriore dell'unità principale.
2. Collegare gli accessori nella parte posteriore dell'unità principale.
3. Accendere l'apparecchiatura tramite il tasto "POWER".
4. Collocare il braccialetto sul polso del paziente impregnato di gel conduttore.
5. Applicare del gel conduttore in abbondanza sulla superficie della pelle da trattare.
6. Selezionare il tipo di onda premendo "STATE", la potenza di uscita con il tasto "ENERGY" e il tempo di operazione con "TIMER". È possibile cambiare queste impostazioni durante il trattamento.
7. Premere "START/PAUSE" per cominciare. Una volta che il circuito è chiuso tra il paziente e la spatola, l'apparecchiatura comincia a funzionare. Il segnale luminoso di Scrubber nel display lampeggerà. Quando la spatola si separa della pelle del paziente, l'apparecchiatura entrerà in pausa e scomparirà il segnale luminoso dal display. L'apparecchiatura si riavvia quando si reinstaura nuovamente il contatto tra la pelle e la spatola. Durante il trattamento, collocare la spatola in un angolo di 45° sull'area da trattare e avanzare dolcemente per ottenere l'effetto pulizia della pelle.

Esistono 3 tipi d'onda selezionabili attraverso il tasto STATE:

- Continua : produce un calore costante sul tessuto. Non applicare per troppo tempo per evitare scottature sulla cute. Non lavorare a potenza troppo elevata. Indicata per pelli normali.
- Pulsata : non provoca calore sulla pelle, per questo motivo è possibile lavorare a potenze superiori. Indicata per pelli sensibili e delicate
- Combinata : combinazione delle due onde. Iniziare il trattamento con l'onda pulsata e la potenza al minimo ed aumentare poco a poco la potenza. Se la pelle da trattare è delicata o sensibile, mantenere l'onda pulsata. Se la pelle è normale ed il paziente si sente a suo agio cambiare dall'onda pulsata alla combinata con la potenza al minimo. Aumentare poco a poco la potenza, e se il paziente si sente ancora a suo agio seguire con l'onda continua alla potenza in cui il paziente si sente comodo e a discrezione del professionista.

**NOTE** Un sistema di controllo positivo salvavita è in funzionamento mentre l'apparecchio è acceso. Questo significa che nel caso che l'apparecchiatura non possa trovare un ritorno a terra, il sistema taglierà la corrente di uscita della spatola. Nonostante ciò, una volta che la spatola sia in contatto di nuovo con il paziente (e trovi il circuito di terra) il sistema riavvia la corrente immediatamente. Questo è un meccanismo di sicurezza e non deve essere confuso con un errore del sistema.

### **PRECAUZIONI**

Le persone con le seguenti malattie non possono utilizzare questa apparecchiatura:  
persone con malattie del cuore, malattie infettive, ipersensibilità o con protesi mediche.

- Non mantenere la spatola nella stessa posizione per troppo tempo, per evitare bruciate.
- Applicare del gel conduttivo con abbondanza.
- Manipolare la spatola con molta cura perchè delicata. Fare attenzione alla lama della spatola, giacché ogni danno potrebbe provocare ferite sulla pelle.



## **FAQ**

Improvvisamente la spatola non funziona:

- Se la spatola si separa della pelle, smette di emettere dopo 5 secondi. Questo è un meccanismo di sicurezza e non deve confondersi con un errore del sistema. Quando si torna a toccare la pelle con la spatola, essa tornerà a emettere dopo 5 secondi.

## **MANTENIMENTO**

- Dell'eventuale olio sulla spatola si deve pulire immediatamente.
- Dopo l'uso, pulire la spatola e conservarla nell'apposito protettore.
- Conservare la spatola con cura per evitare danneggiarla.

## **SCHEMA TECNICA**

Dimensioni dell'imballaggio: 49x45x19,5 cm

Dimensioni dell'unità principale: 33x28x9,5 cm

Peso lordo: 5 Kg

Peso netto: 4,5 Kg

Caratteristiche di lavoro:

Potenza di lavoro: 6 W

Frequenza di lavoro: 25-27 KHz

Caratteristiche elettriche:

Tensione nominale: 220 ~ 240V

Frequenza: 50/60 Hz